

# アルコール注出器

近年、医療関係あるいは食品取扱い等において不完全な消毒による事故が多く話題に上がっています。殺菌目的に使用されている消毒液にはアルコール類が一番多く使用されています。通常、コットンやガーゼ等を一定量容器に収納し、その上から消毒液を注いで浸透させた物を使用しますが、容器を頻繁に開閉して使用する上に、これらの容器はアルコール類のように揮発性、蒸発性の激しい消毒液には完全密閉の環境を提供できていないのが現状です。この問題に着眼し、アルコール類の劣化を回避するために製品化したのがこのアルコール注出器です。

## 本注出器の特徴

容器を交換せず、本注出器用蓋に交換するだけで使用できるので、市販の毒液の威力を損なうことなく消毒が可能です。

軽いタッチで消毒液を注出できるので、両手を煩わせることなく、片手で簡単に操作が出来ます。

医療目的に限らず、注出器のタイプ選定によりカット紙等を使用することで食品取扱いの消毒にも効果を発揮出来ます。

## 使用方法

市販の容器の蓋を外し、注出器本体と容器の間にOリングを挿み蓋本体を挿入、押さえネジリングのネジを右回転させて締め付けます。

180度回転させ、蓋部を下にして保持具に挿入します。

カット綿等をピンセット又は指先でつまみ、注出器下部から出ているニードルバーの先端に当て、軽く押し上げて消毒液を適量浸透させてご使用ください。


容器保持具等多様な取り付け部品(機種別/別売品)を使用することで、テーブルの側面、ベッドの縦・横のパイプ等あらゆる所に取り付けることが可能です。



据置型（ステンレストレイ型）



壁直付け型

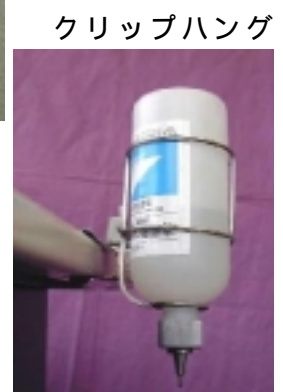

クリップハング